

**Kullanım Talimatları**  
**Büyük Boy Kalkan (Bölüm # I00043)**

Soket kalkan enükleasyon, eviserasyon ve ikincil implant ameliyatında kullanılan akrilik oval eğrileri olan bir boşluk doldurucudur.

Kalkanın amacı oküler protezin yerleştirileceği yerdeki boşluğu korumaktır. Ayrıca konvanktival sütürler ile göz kapağı arkası arasında bir bariyer görevi görmektedir. Böylece sütürler sürtünmez ve göz kapaklarının arkasını tahriş etmez.

Konjanktival katman kapatıldıktan sonra kalkan soketin içine yerleştirilir. Göz kapağının arkasında üst ve alt tavanda oturur. Kalkan soketteki ödem oküler protez sokete uygun şekilde oturacak şekilde yeterince azalınca kadar yerinde kalır.

**Kalkanlar STERİL DEĞİLDİR.**

Tekrar steril etmeyiniz veya bir kereden fazla steril etmeyiniz. Kalkanı paketten çıkarın ve Sterrad ile uyumlu bir poşete (selüloz olmayan poşete) koyunuz.

STERRAD®'in talimatlarına göre STERRAD® 100S Sterilizasyon Sisteminde kısa tam devirden geçirildiğinde kalkanların Sterillik güvence seviyesi  $10^{-6}$  da sağlanmıştır.

I00248 Rev. 02 06/ 2011



Integrated Orbital Implants  
San Diego, CA 92121, USA  
Tel.: 858-677-9990 Fax: 858-677-9993  
In USA only: 800-424-6537